

Telefoon met Versterking en Foto ID



Nederlands

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
INLEIDING	2
De telefoon uitpakken	3
OMSCHRIJVING	4
Algemene beschrijving	4
INSTELLINGEN	5
Opstelling	6
Instellingen van het belsignaal	6
Instelling van de Flash (= seintje voor herroeping)	6
Instelling v/h Ontvangstvolume	6
Instelling van het volume van de luidspreker	7
DE TELEFOON GEBRUIKEN	8
Iemand bellen	8
Een gesprek aannemen	9
Laatste nummer opnieuw bellen	9
Gebruik van gehoorapparaten	9
Flash signaal	9
GEHEUGEN	10
Een nummer in het telefoonboek opslaan	10
Een nummer uit het telefoonboek bellen	10
PROBLEMEN OPLOSSEN	11
VEILIGHEIDSINFORMATIE	12
KENMERKEN	13
GARANTEE	13
CE Richtlijnen	14

INLEIDING

We verwijzen u naar onze website (www.geemarc.com) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke wijzigingen zijn voor u die van belang zijn!

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Geemarc PHOTOPHONE110. Dit is een versterkte telefoon met grote toetsen. Het toetsenbord met de grote toetsen is goed te zien en gemakkelijk te gebruiken en voorkomt dat u nummers verkeerd indrukt. De telefoon heeft ook kiesknoppen met foto's, speciaal ontworpen om kiezen gemakkelijker te maken zodat u in staat bent deze snelkiesknoppen met foto's van uw vrienden of familie te identificeren. Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten.

Om alle mogelijkheden van uw Geemarc telefoon volledig te benutten, is het van belang dat u eerst de onderstaande instructies leest. Bewaar deze gebruikshandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.

Deze handleiding legt u uit hoe u de telefoon moet gebruiken.
PHOTOPHONE 110

De telefoon uitpakken

Wanneer u de telefoon uitpakt, moet u het volgende vinden in de verpakking:

- 1 PHOTOPHONE 110 basisstation
- 1 PHOTOPHONE 110 handset met gedraaid koord
- 1 Telefoonaansluitsnoer
- 1 Gebruikshandleiding



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

E-mail: **help@geemarc.com**

Telefoon: **01707 387602**


De lijnen staan open van 9:00 – 16:00 uur op maandag t/m vrijdag.

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
Frankrijk


OMSCHRIJVING

Algemene beschrijving

- | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1) M3 | 7) Opnieuw draaien | 13) M5 |
| 2) M4 | 8) Luidspreker (handenvrij) | 14) Numerieke toets |
| 3) M7 | 9) Rode LED v/d bel | 15) Versterker knop |
| 4) M8 | 10) M2 | 16) Lijn |
| 5) Opslaan | 11) SOS | 17) Flash (100-300) |
| 6) Flash | 12) M6 | 18) Versterking (aan/uit) |

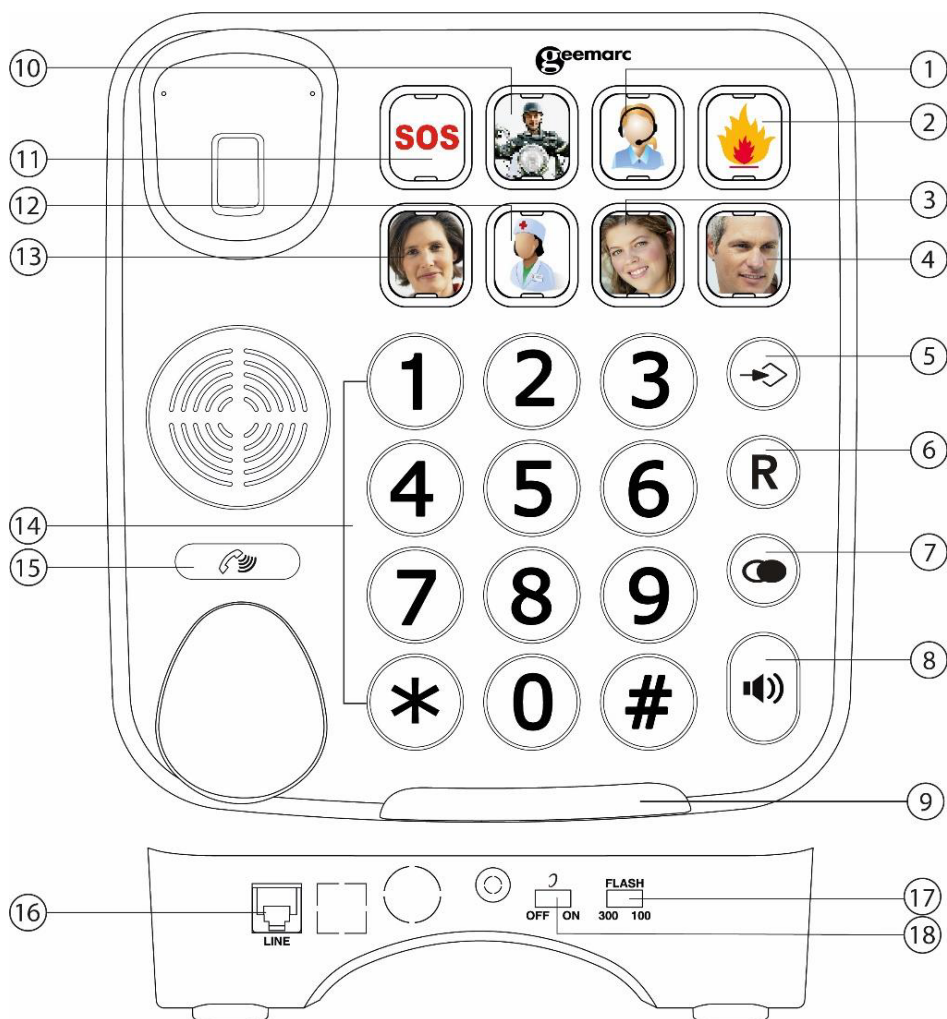

OMSCHRIJVING

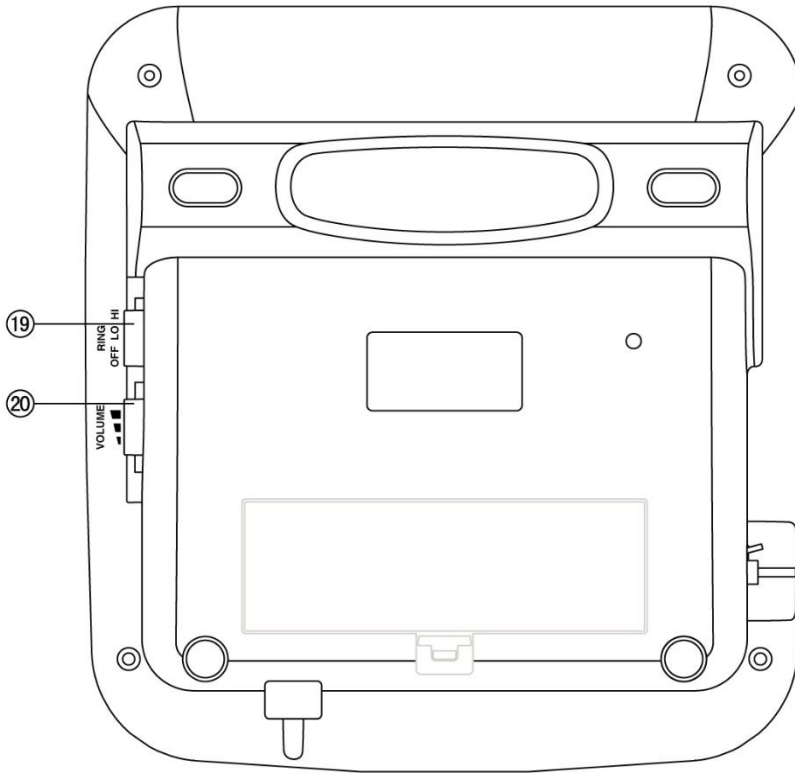

- 19) Belvolume schakelaar
- 20) Volume potentiometer

INSTELLINGEN

Opstelling

Verbind het ene uiteinde van het gedraaide koord met de handset. Steek het andere uiteinde van het gedraaide koord in de stekerbuis aan de linkerkant van het PHOTOPHONE110 basisstation. Leg de handset op het basisstation.

Verbind het aansluitsnoer in de stekerbuis aan de achterkant van het basisstation en steek daarna het andere uiteinde van het aansluitsnoer in de wandcontactdoos of internet box*.

(*) TNV-3 classificatie volgens EN62368-1 norm

Instellingen van het belsignaal


Een schakelaar aan de rechterkant van het PHOTOPHONE110 eenheid maakt het mogelijk om het volume van het belsignaal op **HI** (maximaal volume), **LO** (laagste volume) of **OFF** (= UIT voor als u niet gestoord wenst te worden) te zetten.


Instelling van de Flash (= seintje voor herroeping)

U kunt de 'Flash' tijd aanpassen door de schakelaar aan de achterkant van uw telefoon te gebruiken. Er zijn twee niveaus beschikbaar: 100ms en 300ms. Uw telefoon is ingesteld op een FLASH tijd van R=100ms voor het Verenigd Koninkrijk en Europa en R=300ms voor Frankrijk. Als u de 'Flash' schakelaar is verzet van 100ms naar 300ms - en omgekeerd - moet het aansluitsnoer van uw telefoon 10 minuten losgekoppeld blijven totdat de verandering is uitgevoerd.

Instelling v/h Ontvangstvolume

U kunt tijdens een conversatie het ontvangstvolume veranderen volgens uw gehoorsbehoeften.

Gebruik de volumeschuifregelaar  **VOL.** boven aan de rechterkant van het basisstation om het niveau aan te passen. Het volume kan veranderd worden van 6dB tot 9dB.

De **AMPLIFY** knop  onder op het basisstation levert een extra 18dB versterking van het geluid, d.w.z. de volumeverandering zal

INSTELLINGEN

30dB worden. Wanneer de **versterkingsfunctie geactiveerd is**, zal de **AMPLIFY LED** oplichten.





Standaard instelling voor versterking

De Amplify **AAN/UIT** schakelaar  aan de achterkant maakt het mogelijk om de versterking standaard **AAN** of **UIT** te zetten elke keer dat u de telefoon gebruikt.

AMPLIFY AAN/UIT schakelaar in de AAN stand

De extra versterking wordt automatisch elke keer dat u de telefoon gebruikt geactiveerd.


Een druk op de AMPLIFY knop () tijdens een conversatie zal de extra versterking uitschakelen. U kunt echter het ontvangstvolume van de handset nog steeds veranderen m.b.v. de volumeschuifregelaar.

Onafhankelijk van hoeveel keer u tijdens een conversatie de AMPLIFY knop () indrukt, zullen deze functies opnieuw geactiveerd worden de volgende keer dat u de handset oppakt om iemand te bellen.

AMPLIFY AAN/UIT schakelaar in de UIT stand


De extra versterking wordt automatisch elke keer dat u de telefoon gebruikt gedeactiveerd.

Een enkele druk op de AMPLIFY knop () tijdens een conversatie zal de extra versterking inschakelen. Als u de AMPLIFY knop () nog een keer indrukt, zal de extra versterking opnieuw uitgeschakeld worden.

Onafhankelijk van hoeveel keer u tijdens een conversatie de AMPLIFY knop () indrukt, zullen deze functies opnieuw uitgeschakeld worden de volgende keer dat u de handset oppakt om iemand te bellen.

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Instelling van het volume van de luidspreker

In de handenvrij stand kan het luidspreekervolume worden aangepast m.b.v. de volumeschuifregelaar  VOL. aan de rechterkant van de telefoon.


Iemand bellen

Neem de handset ter hand.

Wanneer u de kiestoon hoort, toets u het nummer in op het toetsenbord.


Leg de handset terug om het gesprek te beëindigen.

Iemand handenvrij bellen

Druk de  knop in om een kiestoon te krijgen.

Toets het telefoonnummer in op het toetsenbord.

Druk nogmaals op de  knop om het gesprek te beëindigen.

Om tijdens een gesprek de handenvrije functie te activeren, druk u op de **LUIDSPREKER**  knop en legt u de handset tegelijkertijd terug op de hoornhouder.

Om tijdens een gesprek de handenvrije functie uit te schakelen, neemt u de handset ter hand.

NB: Wanneer de telefoon in de handenvrij stand staat, mag er slechts één persoon praten. De overschakeling van luidspreker naar microfoon is automatisch. Dit is afhankelijk van het geluidsniveau van respectievelijk de binnenkomende oproep en de microfoon. Het is daarom essentieel dat er geen harde

DE TELEFOON GEBRUIKEN

geluiden (bijv. muziek) in de onmiddellijke omgeving van de telefoon zijn, omdat dit de handenvrije functie zal verstoren.


Een gesprek aannemen


Wanneer een inkomend gesprek wordt ontvangen, dan geeft de telefoon een belsignaal en de LED van inkomende gesprekken zal oplichten.

Neem de handset ter hand en spreek.


Leg de handset terug om het gesprek te beëindigen.


Een gesprek handenvrij aannemen

Druk de  knop in om handenvrij te spreken.

Druk nogmaals op de  knop om het gesprek te beëindigen.

Laatste nummer opnieuw bellen

Neem de handset ter hand of druk de  knop in om handenvrij te bellen.

Druk op  om het laatst ingetoetste nummer opnieuw te bellen.

Gebruik van gehoorapparaten

Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Select the T mode on your hearing aid to enable this feature.


Flash signaal


De **FLASH** knop kan gebruikt worden met speciale services zoals Wachtstand (indien uw telefoondienst dit levert) of om externe gesprekken naar een ander op een privé telefooncentrale aangesloten toestel over te zetten.

GEHEUGEN

Een nummer in het telefoonboek opslaan

Er zijn 8 in het geheugen opgeslagen fotoknoppen (8 draaiknoppen m.b.v. foto's). U kunt de foto van uw contact onder het perspex van de knop schuiven. Dit is erg handig als u geneigd bent om telefoonnummers of namen te vergeten.

Laat de handset op het basisstation liggen. Voer het telefoonnummer in dat u wenst op te slaan (tot 16 cijfers). Indien nodig kunt u de  knop gebruiken om een pauze in te lassen.

Druk op .

Druk op de gewenste geheugenlocatie (één van de 8 draaiknoppen m.b.v. foto's). Het telefoonnummer wordt in die geheugenlocatie bewaard.

Een nieuw nummer invoeren in het geheugen, waarin al een nummer is opgeslagen, zal automatisch het originele nummer wissen.

NB: Ook als u nummers van familie of vrienden in een fototoets wilt bewaren, kunt u hun foto's hierin stoppen.

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Neem de handset ter hand. Of doe dit niet als u in de luidsprekerstand wilt bellen.

Druk op de gewenste geheugenlocatie (één van de 8 draaiknoppen m.b.v. foto's).

Het telefoonnummer zal automatisch gebeld worden.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De PHOTOPHONE110 gaat niet over

- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer van de telefoon correct is aangesloten en niet beschadigd is.
- Verbind een andere telefoon met de PTT stekkerdoos of verplaats uw telefoon naar een andere stekkerdoos om te controleren of de storing aan uw telefoon ligt of aan de PTT stekkerdoos.
- Er kunnen teveel communicatieapparaten (bijv. modem, fax of een tweede telefoon) met één telefoonlijn verbonden zijn. Neem contact op met uw netwerkdienstverlener om het maximale aantal aansluitingen voor uw telefoonlijn (privé of zakelijk) te bepalen.
- Zorg ervoor dat de instelling van het belsignaal is niet in de UIT stand.

Geen kiestoon

- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer van de telefoon correct is aangesloten en niet beschadigd is.
- Verbind een andere telefoon met de PTT stekkerdoos of verplaats uw telefoon naar een andere stekkerdoos om te controleren of de storing aan uw telefoon ligt of aan de PTT stekkerdoos.
- Er kunnen teveel communicatieapparaten (bijv. modem, fax of een tweede telefoon) met één telefoonlijn verbonden zijn. Neem contact op met uw netwerkdienstverlener om het maximale aantal aansluitingen voor uw telefoonlijn (privé of zakelijk) te bepalen.

Onbruikbare 'sneltoets' geheugentoets

- Controleer of het een opgeslagen nummer heeft. Zo niet, sla het nummer dan nogmaals op.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Algemeen

Wanneer u uw telefoon gebruikt, moet u altijd de voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid in acht nemen om gevaren van brand, elektrische schokken en verwonding te minimaliseren waaronder het volgende:

1. Lees, begrijp en volg alle waarschuwingen en instructies.
2. Neem dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
3. Zet dit product niet op onstabiele oppervlakten. Het product kan vallen en serieuze schade aan het product veroorzaken.
4. Stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelasten vanwege het gevaar van brand of elektrische schokken.
5. Duw nooit welk soort object dan ook in dit product via sleuven want deze kunnen gevaarlijke voltagepunten aanraken of onderdelen kortsluiten resulterend in het gevaar van brand of elektrische schokken. Nooit welk soort vloeistof op het product morsen.
6. Vermijd dit product te verplaatsen of los te koppelen tijdens een zware storm vanwege het risico van elektrische schokken van onweer.
7. Een onprofessionele persoon mag de telefoon niet open maken want dit leidt tot problemen: stuur de telefoon naar het servicecentrum.

FUNCTIES/ GARANTIE

Grote nummertoeetsen ontworpen voor oudere mensen

- Compatibel met gehoorapparaten (optioneel)
- Versterkingsfunctie voor de handsetontvanger
- Acht (8) 'snel-toets' geheugens (incl. 4 fototoetsen)
- Flash en opnieuw draaien functie
- Keuze van Flashtijd m.b.v. een schakelaar
- Handset en andenvrij volumeaanpassing m.b.v. potentiometer
- Belvolume schakelaar (hoog, laag en uit)
- Handenvrij draaien en spreken
- Heldere LED belindicatie

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE *EN* MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

CE Richtlijnen

CE Richtlijnen



Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container.
Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

E-mail: help@geemarc.com Telephone : **01707 387602**
De lijnen staan open van 9:00 – 16:00 uur op maandag t/m vrijdag.

2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59760 Grande-Synthe,
Frankrijk

Dit product is gemaakt in China naar Geemarc Telecom



UGPhotoPHONE110_NL_v1.1

Geemarc Telecom SA
Parc de l'Etoile
2 Rue Galilée
59760 Grande-Synthe